

inoCore

Dual Cure Core Build Up Resin

inoCore

inoCore는 이원 중합형 치과용 지대치 축조제로서, 편리한 조작성과 우수한 압축강도로 모든 분야의 지대치 축조에 사용할 수 있습니다. inoCore는 A3, Blue color 2가지가 있습니다.

제품의 특성

- 1) 치아강도(상아질)와 비슷한 강도를 가지고 있어 삭제감이 뛰어납니다.
- 2) A3와 Blue 색상이 있어 선택의 폭이 넓습니다.
- 3) 믹싱팁 장착 시 부드럽게 나옵니다.
- 4) 에코팁 장착이 가능하며 inoCore의 사용량을 최소화 하였습니다.

적용 범위

- 1) 모든 종류의 코아 빌드 업 2) 치아 손상 부위의 치료 목적의 영구 수복

사용 방법

1) 사용 전 준비사항

- ① 사용 전 제품의 유효기간 및 포장 상태 확인.
- ② inoCore에 에코팁 또는 믹싱팁을 장착합니다.

2) 적용

- ① 치아를 세척, 건조 및 준비합니다. ② 시술 부위의 외동을 준비합니다.
- ③ 에칭과 본딩으로 전 처리 합니다. (본딩사용주의)
- ④ inoCore의 적당량을 시술 부위에 채워 넣습니다.
- ⑤ 광조사 합니다. 자가중합인 경우 (구강 내): ≤ 5분 (LED 광조사기: 20초, 할로겐 광조사기: 40초)
- ⑥ 치아 및 지대치 축조재를 삭제 합니다.
(참고: 자가 중합시(구강 내) - 믹싱팁 사용시: ≤ 4분, 에코팁 사용시: (핸드 믹스): ≤ 6분)

제품 물성

압축강도: 310MPa, 종합깊이(20초): 5.1mm

포장단위

inoCore 5ml(10g)시린지 X 2개, eco tip, mixing tip, 사용설명서

주의사항

- 1) 작업시간은 1℃ 상승/하강에 따라 5초 가량 빠르거나 늦어집니다.
- 2) 본 제품은 의복에 묻으면 제거되지 않으므로 묻지 않도록 주의합니다.
- 3) 피부나 눈에 닿았을 경우 깨끗한 물로 여러 번 세척 후 필요 시 전문의의 상담을 받으시기 바랍니다.
- 4) 유효기간이 지난 제품을 사용하지 않도록 합니다.
- 5) 본 제품은 치과 종사자 외에 사용하거나 만지지 않도록 주의합니다.

보관 방법

- 1) 고온 및 강한 빛을 피하도록 합니다.
- 2) 사용 후 즉시 뚜껑을 닫아 보관합니다.
- 3) 건조하고 서늘한 곳에서 저장 합니다.
- 4) 유효 기간은 제조일로부터 2년 입니다.