

• 사용방법

1. 원하는 부위의 치아를 격리한다.
2. 도포하고자 하는 치아 부분에 분리제를 바르고 건조시킨다.
3. INO MULTI-GEL을 개봉하여 동봉된 팁을 시린지에 장착한다.
4. 필요한 만큼 치아 위에 도포하고 원하는 모양으로 모델링한다.
5. 광중합기를 이용하여 경화시킨다.
6. 경화된 젤을 치아와 분리한다.

• 사용시 주의사항

1. 본 제품은 용도 이외의 사용이나 비전문가의 사용을 금지한다.
2. 사용자는 제품의 사용방법을 숙지한 후 사용한다.
3. 사용 시 장갑 및 보호구를 착용한다.
4. 사용 시 피부, 눈, 점막 등의 접촉을 주의한다.
5. 눈이나 피부에 우발적인 접촉이 발생하면 즉시 많은 물로 씻어 내고 의료 조치를 취한다.
6. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 않는다.

• 사용 후 보관 및 관리방법

1. 사용 후 즉시 팁을 제거한 뒤 카트리지의 뚜껑을 막아서 보관한다.
2. 직사광선을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관한다.

• 포장단위

MG 14 RED 1 14ml x 1 syringe, Disposable tips
MG 14 RED 5 14ml x 5 syringes, Disposable tips
MG 14 PINK 14ml x 1 syringe, Disposable tips
MG 14 PINK 5 14ml x 5 syringe, Disposable tips

• 유효기간

제조일로부터 3년

부작용 보고
관련 문의처

한국의료기기안전정보원
080-080-4183