

SES MESH

Instruction Manual

I 제품설명

1. SES FIBER MESH

2. 제품크기

순번	형명	가로(mm)	세로(mm)	두께(mm)
1	SES1108	70	90	0.45

I 사용설명

1. 사용 전 확인사항


- 사용 전 제품 내부에 어떠한 결함이나 불필요한 물질이 있는지 확인합니다.
- 설명서를 확실히 읽어주세요.

2. 사용방법


- 석고 모형위에 왁스를 펼칩니다.
- 석고 모형에 알맞은 크기로 펼친 후 남은 왁스를 제거합니다.



- 왁스위에 tissue stop을 형성한 다음 pink resin을 채웁니다.
- 왁스위에 SES Fiber Mesh 를 알맞게 놓은 다음 진공 필름에 넣습니다.

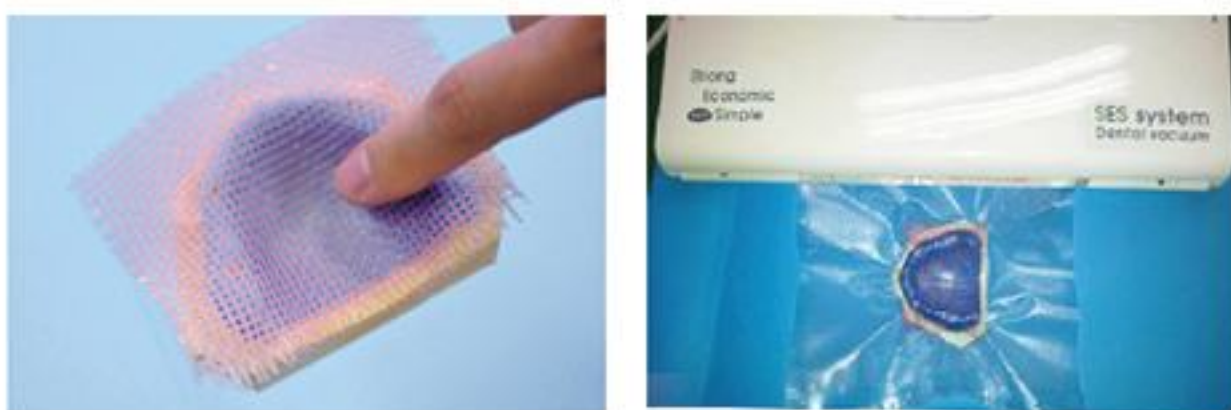


- e. Vacuum unit을 이용하여 완벽히 진공흡착 시킨다.
- f. 흡착된 모형을 그대로 curing unit에 넣고, 4분간 light curing한다.
- g. Light curing 후 필름을 제거한 후 경화된 fiber mesh위에 100℃뜨거운 물을 부어 왁스를 깨끗이 제거합니다.
(주의: 뜨거운 물로 왁스를 제거하기 전에 모형에서 fiber mesh를 분리시키면 fiber mesh에 손상이나 변형을 일으킬 수 있습니다.)

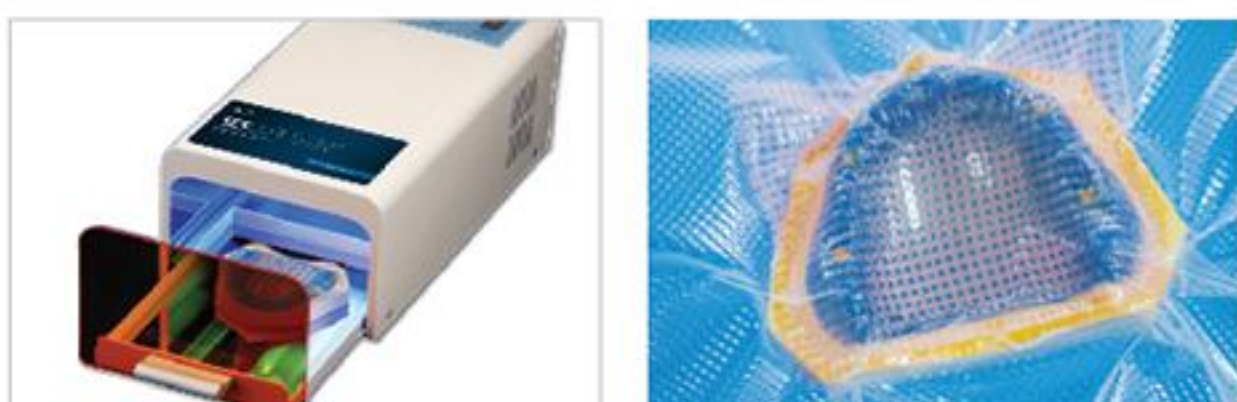

- h. 왁스를 제거한 후 fiber mesh를 분리시킨 후 알맞은 크기로 가위로 잘라서 사용합니다.

3. 사용후 보관지침

- a. 단일 사용 후 폐기
- b. 직사광선과 상온 보관을 피하고, 실온에 보관한다.
- c. 여분은 포장된 팩에 그대로 넣어서 보관한다.

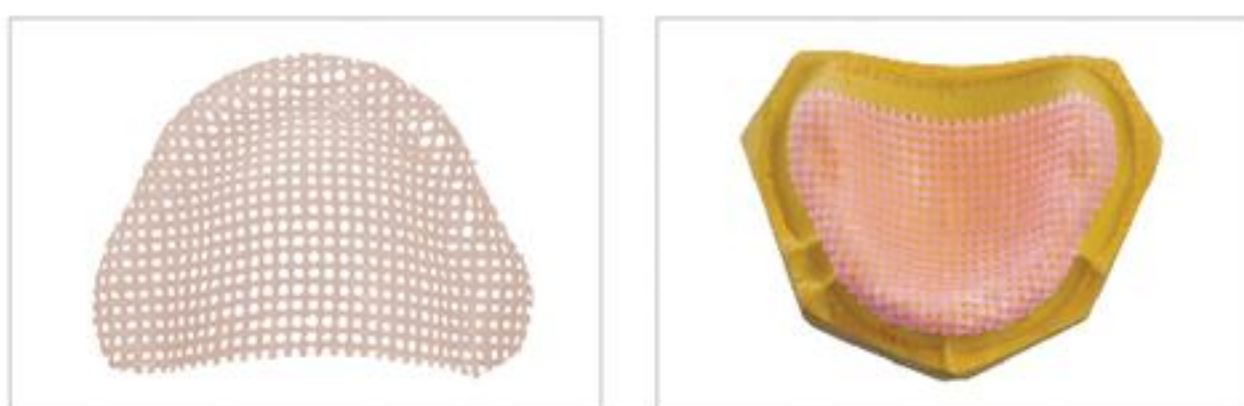

주의사항

1. 사용 시 직사광선을 피하십시오.
2. 제품을 개봉한 후 1시간 이내에 사용완료 하십시오.
3. 다른 이물질과 함께 섞이지 않게 조심하십시오.

INNO DENTAL Co., Ltd.

www.inod.co.kr | inod55@naver.com

Tel : 02-757-1112, 779-1113 / Fax : 02-757-9990



SES MESH

Instruction Manual

I 제품설명

1. SES FIBER MESH

2. 제품크기

순번	형명	가로(mm)	세로(mm)	두께(mm)
1	SES1611	70	130	0.45


I 사용설명

1. 사용 전 확인사항


- 사용 전 제품 내부에 어떠한 결함이나 불필요한 물질이 있는지 확인합니다.
- 설명서를 확실히 읽어주세요.

2. 사용방법



- 석고 모형위에 왁스를 펼칩니다.
- 석고 모형에 알맞은 크기로 펼친 후 남은 왁스를 제거합니다.

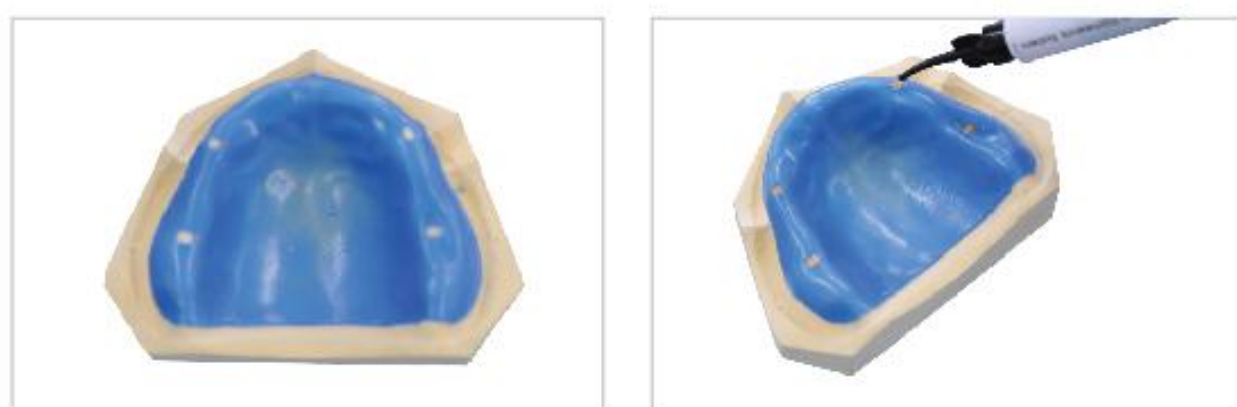

- 왁스위에 tissue stop을 형성한 다음 pink resin을 채웁니다.
- 왁스위에 SES Fiber Mesh 를 알맞게 놓은 다음 진공 필름에 넣습니다.

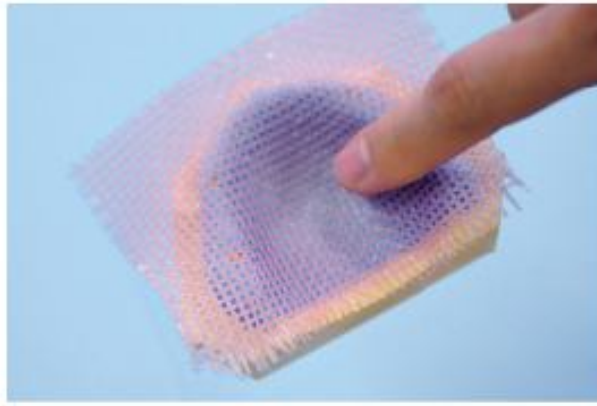

- e. Vacuum unit을 이용하여 완벽히 진공흡착 시킨다.
- f. 흡착된 모형을 그대로 curing unit에 넣고, 4분간 light curing한다.
- g. Light curing 후 필름을 제거한 후 경화된 fiber mesh위에 100℃뜨거운 물을 부어 왁스를 깨끗이 제거합니다.
(주의: 뜨거운 물로 왁스를 제거하기 전에 모형에서 fiber mesh를 분리시키면 fiber mesh에 손상이나 변형을 일으킬 수 있습니다.)

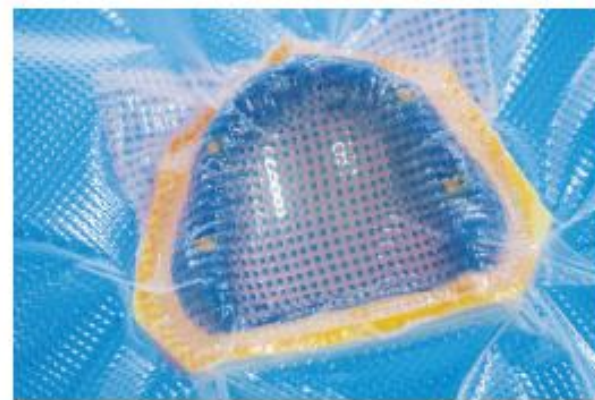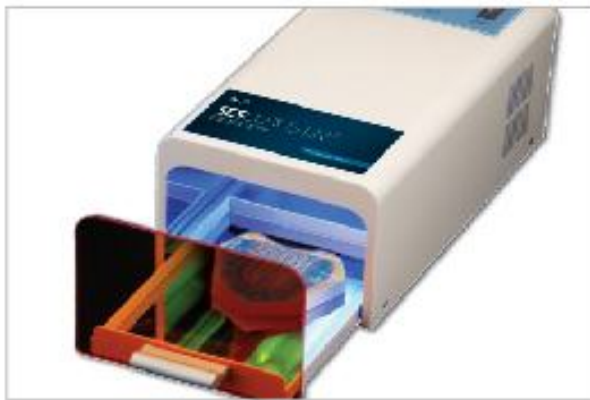

- h. 왁스를 제거한 후 fiber mesh를 분리시킨 후 알맞은 크기로 가위로 잘라서 사용합니다.

3. 사용후 보관지침

- a. 단일 사용 후 폐기
- b. 직사광선과 상온 보관을 피하고, 실온에 보관한다.
- c. 여분은 포장된 팩에 그대로 넣어서 보관한다.



주의사항

1. 사용 시 직사광선을 피하십시오.
2. 제품을 개봉한 후 1시간 이내에 사용완료 하십시오.
3. 다른 이물질과 함께 섞이지 않게 조심하십시오.