

제품규격

MODEL	가로(mm)	세로(mm)
SES LOWER MESH	150	3.5

사용방법

1. 사용 전 준비사항

- 사용 전 제품의 이상상태 및 이물질 여부를 확인합니다.
- 사용설명서를 통하여 사용방법을 충분히 숙지합니다.

2. 사용방법

- Stone Model 위에 0.45mm 왁스를 펼칩니다
- Stone Model에 알맞은 크기로 펼친 후 남은 왁스를 제거합니다.



- 왁스위에 4군데 Tissue stop을 형성합니다.
- Tissue stop에 SES Flowable Resin을 주입합니다.



- Mesh를 15게이지 라운드 폼으로 둥글게 만듭니다.
- SES LOWER MESH를 Tissue stop 위치에 알맞게 놓은 다음 진공필름에 넣습니다.
- Vacuum unit을 이용하여 완벽히 진공흡착 시킵니다.

- 흡착된 Model을 그대로 Curing unit에 넣고, 4분간 Light curing을 합니다.
- Light curing 후 필름을 제거한 후 Stone Model상에 경화된 SES LOWER MESH위에 100℃의 뜨거운 물을 부어 왁스를 깨끗이 제거합니다.

*** 주의)** 뜨거운 물로 왁스를 제거하기 전에 모형에서 SES LOWER MESH를 분리시키면 SES LOWER MESH가 변형을 일으킬 수 있습니다.



- 왁스를 제거하시면 가볍게 분리가 됩니다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- 일회용으로 재사용 금지.
- 실온의 건조한 곳에 빛과 반응하지 못하도록 보관합니다.



* 사용시 주의사항

- 사용 시 직사광선에 노출되지 않도록 작업합니다.
- 제품을 개봉한 후 1시간 이내에 작업을 완료합니다.
- 이물질이 묻지 않도록 합니다.